

## MONTAGE MODULE DE CAPNO EN SAUV

Il existe deux sortes de modules de capno en SAUV : 1 module avec piège à eau et le microstream (sans piège à eau) :



Pour chaque module, les consommables (lunettes et raccord ETCO2 sont différents).


**Merci de laisser le capno « Microstream » en SAUV 1 et SRUV 1.**

Afin de faciliter la gestion des commandes.

# MONTAGE MODULE DE CAPNO EN SAUV

## 1. Module avec piège à eau

- Pour une sédation procédurale : module de capno + lunettes

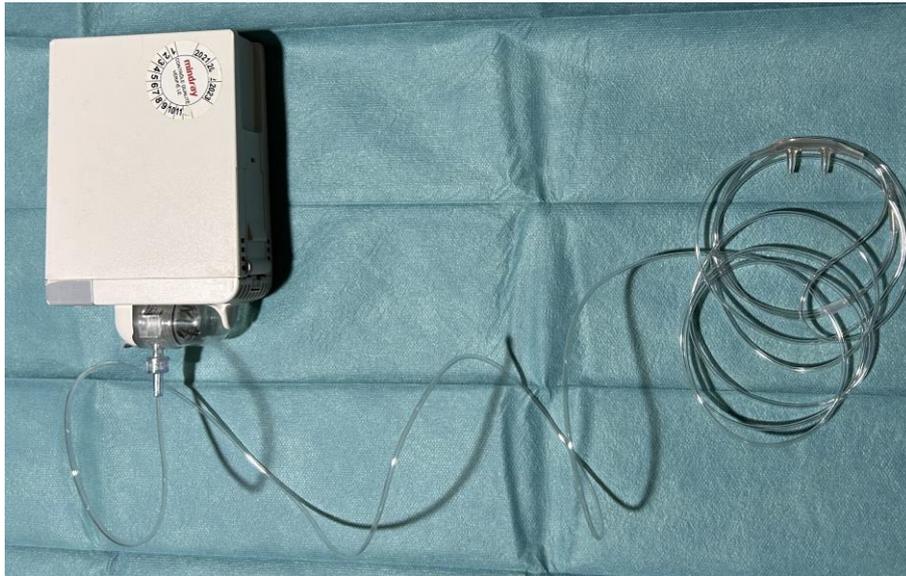


- Si intubation : module de capno + raccord ETCO2 sur le filtre




## 2. Module sans piège à eau

- Pour une sédation procédurale : module de capno + lunettes

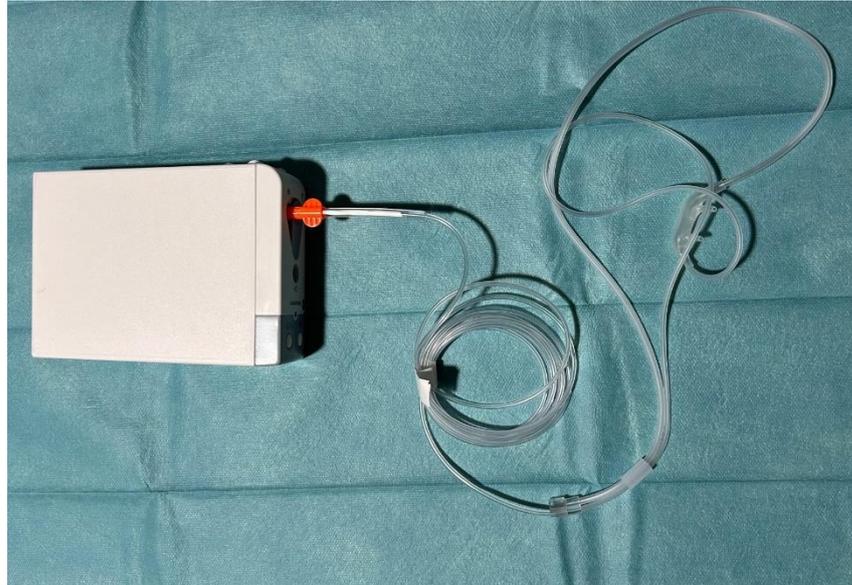

- Si intubation : module de capno + raccord ETCO2 sur le filtre

Contrairement aux tubulures « classiques », celles-ci possèdent un embout qui se glisse entre le filtre et la sonde.

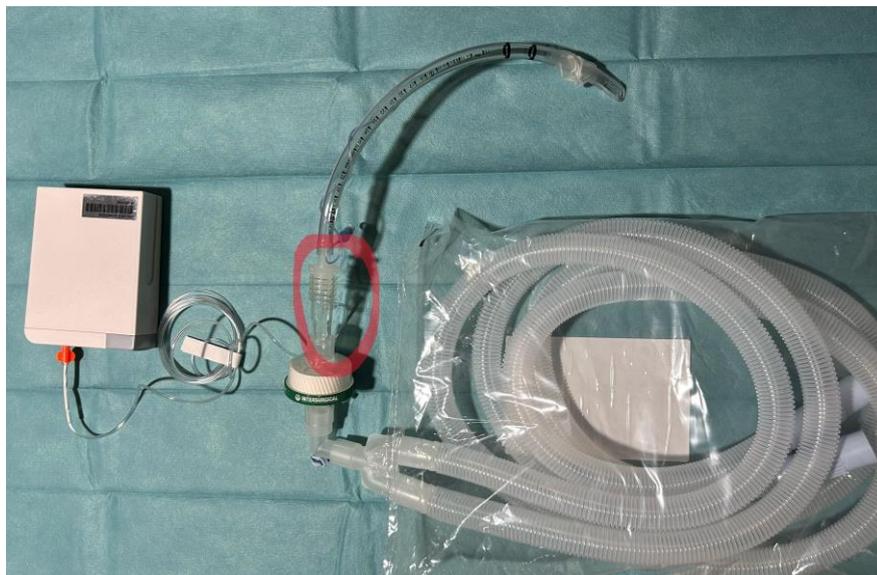

# MONTAGE MODULE DE CAPNO EN SAUV

